



GRUSZKA do zaparc

PROFESSIONAL & CONVENIENT

SZYBKI I PROSTY SPOSÓB NA ZAPARCIA



- Unikatowa i bezpieczna zaokrąglona końcówka
- Bezpieczna dla skóry, nie zawiera ftalanów



Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy zachować ostrożność i przeczytać instrukcję użytkowania.



Gruszka Sanity® to wysokiej jakości wyrób medyczny, spełniający wszelkie wymagania i normy bezpieczeństwa. Produkt do wykonywania lewatywy doodbytniczej w warunkach domowych. Wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, bezpiecznych dla zdrowia i środowiska.

ZALETY PRODUKTU

- Przynosi ulgę w zaparciach
- Usuwa toksyny z organizmu
- Oczyszcza układ pokarmowy
- Wspomaga w odchudzaniu
- Pobudza perystaltykę i mikroflorę jelitową

PRZEZNACZENIE

- Gruszka z kanką nr 5 - Przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 do 12 miesięcy.
- Gruszka z kanką nr 7 - Przeznaczona dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.
- Gruszka z kanką nr 9 - Przeznaczona dla osób dorosłych.
- Gruszka z kanką nr 11 (XL) - Przeznaczona dla osób dorosłych.

ZASTOSOWANIE

Produkt wspomaga działanie układu pokarmowego: zaparcia, skurcze jelit, przewlekłe bóle brzucha, trudności z wypróżnianiem, zapalenia jelita grubego.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przed wykonaniem zabiegu zawsze skonsultuj się z lekarzem. Przed pierwszym oraz każdym kolejnym użyciem wymyj każdą część wyrobu z osobna, a następnie zanurz na kilka minut w gotującej się wodzie. Zwróć uwagę na to, aby elementy były zanurzone w całości.

Po ostudzeniu, napełnij gruszkę płynem do przepłukiwania, podgrzanym do temperatury ciała. Kankę nasmaruj cienko wazeliną i wprowadź delikatnie i powoli do odbytu. Następnie ściśnij gruszkę energicznie, aby opróżnić jej zawartość do ciała. Przed wyjęciem końcówki zaciśnij mocno pośladek, aby płyn nie wydostał się na zewnątrz.



UWAGA!

Stosuj zgodnie z przeznaczeniem.

Nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej.

Nie stosować środków dezynfekujących.

W razie uszkodzenia jednej z części zniszczyć oraz wyrzucić cały zestaw.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.



Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik mieszka

POZNAJ RÓWNIEŻ INNE PRODUKTY SANITY®



Nasza troskliwa strona internetowa: sanity.pl

Twój Opiekun Sanity
w Biurze Obsługi Klienta:

 **12 271 33 62** | Biuro czynne w dni robocze
od 8:00 do 16:00

od **1995**
W trosce o Twoje zdrowie

since **1995**
We care for your health



Albert Polska Sp. o.o.
ul. Obwodowa 4a
32-410 Dobczyce, Polska

Certyfikowany System ISO 13485

