



TERMOFOR EKO 2I w pokrowcu

PROFESSIONAL & FLEXIBLE

NATURALNIE ROZGRZEWAJĄCY



- Idealny prezent na chłodne dni
- Długo utrzymuje ciepło
- Proste napełnianie i wygodne czyszczenie

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem,
postępuj zgodnie z zaleceniami i ich przestrzegaj



Stosowany w celach profilaktyczno-leczniczych do miejscowego ogrzewania ciała.

INSTRUKCJA UŻYWANIA:

1. Napełnić powoli ciepłą wodą o temperaturze ok. 50°C do 3/4 objętości termoforu.
2. Podczas napełniania termofor trzymać za szyjkę w pozycji pionowej.
3. Wypuścić nadmiar powietrza pochylając termofor powoli nad płaską powierzchnią do momentu, gdy w wylocie pojawi się woda.
4. Zakręcić korek i sprawdzić szczelność.
5. Dokręcenie korka siłą dłoni powinno być wystarczające.
6. Po użyciu wylać wodę i powiesić otworem w dół do całkowitego wysuszenia.



Uwaga!

Termofor jest wykonany z naturalnej gumy, nie powinien być używany przez osoby ze stwierdzonym uczuleniem, alergią na gumę. W przypadku wystąpienia uczulenia, reakcji alergicznej należy zaprzestać używania wyrobu.

Zastosowanie wody o temperaturze powyżej 70°C skracą żywotność termoforu. Może spowodować jego uszkodzenie i w konsekwencji doprowadzić do powstania oparzeń. Nie stosować wody mogącej wywołać oparzenia.



Używać zgodnie z przeznaczeniem. Unikać długiego oraz bezpośredniego kontaktu wyrobu ze skórą. Stosowanie termoforu u dzieci należy zawsze przeprowadzać pod nadzorem osoby dorosłej. Nie umieszczać żadnych przedmiotów na termoforze. Regularnie kontrolować wyrób pod kątem zużycia lub uszkodzeń. W razie ewentualnego uszkodzenia jednej z części zniszczyć oraz wyrzucić cały wyrób, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przechowywać bez zakręcania korka, w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu, z dala od urządzeń grzewczych. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Zachować instrukcje używania.

W przypadku zabrudzenia termofor myć wodą z mydłem.

Nie stosować środków dezynfekujących.

Wyrób nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik mieszka.



Nasza troskliwa strona internetowa: sanity.pl

Twój Opiekun Sanity
w Biurze Obsługi Klienta:

 **12 271 33 62** | Biuro czynne w dni robocze
od 8:00 do 16:00



Albert Polska Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 4a
32-410 Dobczyce, Polska

Certyfikowany System ISO 13485

