



# TERMOFOR 2I

## Z naturalnej gumy + miękki sweterek

PROFESSIONAL & FLEXIBLE

WYKONANY Z NATURALNEJ GUMY



- Idealny prezent na chłodne dni
- Długo utrzymuje ciepło
- Proste napełnianie i wygodne czyszczenie

## Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy zachować ostrożność i przeczytać instrukcję użytkowania.



Wykonany z wysokiej jakości naturalnej gumy, z ryflowanymi ściankami.

Stosowany w celach leczniczych i profilaktycznych do ogrzewania ciała i łagodzenia dolegliwości bólowych.

Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i postępuj zgodnie z zaleceniami.

### PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA:

1. Przygotuj ciepłą wodę o temperaturze ok. 50°C. Nie stosuj wrzątku ani wody mogącej wywołać oparzenie. Odkręć zakrętkę i powoli napełnij termofor wodą do ¾ jego objętości. W trakcie napełniania trzymaj termofor za szyjkę w pozycji pionowej.
2. Pozbądź się nadmiaru powietrza poprzez powolne przechylenie termoforu aż do momentu, kiedy w jego wylocie będzie widoczna woda. Dla wygody możesz oprzeć termofor na płaskiej powierzchni.
3. Zakręć dokładnie kurek i sprawdź jego szczelność, odwracając termofor do dołu. Następnie załóż pokrowiec.



### PRZECHOWYWANIE

Po użyciu wylej wodę i powieś termofor otworem do dołu, w celu jego osuszenia. Przechowuj bez zakręcania korka w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu. Chroni przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikaj kontaktu z urządzeniami grzewczymi i przechowywania w wysokiej temperaturze lub na słońcu.

### CZYSZCZENIE

Pokrowiec wykonany jest z poliestru. W razie jego zabrudzenia prać tylko ręcznie, używając mydła i wody o temperaturze do 30°C. Termofor gumowy przemywać wodą z mydłem. Nie stosować środków dezynfekujących.



#### UWAGA!

Termofor może być używany przez dzieci - zawsze pod nadzorem osoby dorosłej. Unikaj długiego, bezpośredniego kontaktu ze skórą wyrobu bez pokrowca. Nie obciążaj termoforu gdy jest on napełniony wodą. Nie siadaj na nim, nie kładź ciężkich przedmiotów. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w termoforze oraz na nim.

Przed użyciem każdorazowo sprawdź wyrób pod kątem zużycia lub uszkodzeń mechanicznych. W razie zniszczenia jednej z części, należy wyrzucić cały wyrób. Utylizuj go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zastosowanie gorącej wody o temperaturze powyżej 70°C skraca żywotność termoforu, może spowodować jego uszkodzenie i w konsekwencji doprowadzić do oparzenia. Nie podgrzewaj w kuchenke mikrofalowej. Zachowaj instrukcje użytkowania.

Uwaga! Termofor jest wykonany z naturalnej gumy, nie powinien być używany przez osoby ze stwierdzonym uczuleniem, alergią na gumę. W przypadku wystąpienia uczulenia, reakcji alergicznej należy przestać go używać.



Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik mieszka.

## POZNAJ RÓWNIEŻ INNE PRODUKTY SANITY®



Nasza troskliwa strona internetowa: [sanity.pl](http://sanity.pl)

Twój Opiekun Sanity  
w Biurze Obsługi Klienta:

 **12 271 33 62** | Biuro czynne w dni robocze  
od 8:00 do 16:00



Albert Polska Sp. z o.o.  
ul. Obwodowa 4a  
32-410 Dobczyce, Polska

Certyfikowany System ISO 13485

od **1995**  
W trosce o Twoje zdrowie

since **1995**  
We care for your health

