



Sposób na odleżyny

PROFESSIONAL & FLEXIBLE

ZAPOBIEGA I POMAGA



- ZAPOBIEGA POWSTAWANIU ODLEŻYN
- ŁATWE CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE
- ODPORNY NA OBCIĄŻENIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem należy zachować ostrożność i przeczytać instrukcję użytkowania.



KRĄG GUMOWY PRZECIWOLEŻNY SANITY®

Krąg gumowy przeciwoleżny Sanity® służy do pielęgnacji chorych, zapobiegając powstawaniu odleżyn.

SPOSÓB UŻYCIA

Napompować krąg do odpowiedniej twardości, a następnie zamknąć otwór wlotowy poprzez dokręcenie zaworu.

Elastyczność kręgu pozwala na regulowanie jego twardości poprzez dopompowanie lub wypuszczenie powietrza.

Po użyciu należy odkręcić zawór i wypuścić powietrze z kręgu. Czyścić ciepłą wodą z mydłem.

Pokrowiec wykonany z dzianiny frotte, prać w temperaturze 40°C (dotyczy wersji „Krąg gumowy przeciwoleżny SANITY® w pokrowcu”).

⚠ Nie zaleca się stosowania kręgu w bezpośrednim kontakcie z ciałem.


Podczas pompowania kręgu należy zachować ostrożność, ponieważ wewnątrz zaworu znajduje się ruchoma uszczelka gumowa. Brak uszczelki spowoduje nieszczelność kręgu

⚠ Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik mieszka..


ZASTOSOWANIE

Krąg gumowy przeciwoleżny Sanity® służy do pielęgnacji chorych, mających trudności z poruszaniem się. Zapobiega powstawaniu odleżyn i jest pomocny podczas leczenia już powstałych. Jest elastyczny i zmniejsza długotrwały ucisk oraz skraca czas styczności ciała z podłożem. Przestrzeń w środku kręgu zapewnia dostęp powietrza do skóry zagrożonej zmianami, zmniejszając tym samym ryzyko niedotlenienia tkanek. Produkt może być stosowany leczniczo, profilaktycznie i podczas rehabilitacji zarówno w warunkach domowych, jak i klinicznych.


SPOSÓB UŻYCIA

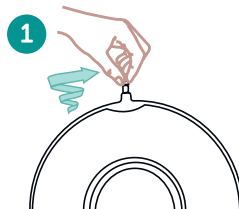

Napompować krąg do odpowiedniej twardości, a następnie zamknąć otwór wlotowy poprzez dokręcenie zaworu.

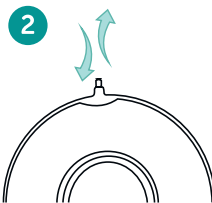

Elastyczność kręgu pozwala na regulowanie jego twardości poprzez dopompowanie lub wypuszczenie powietrza.

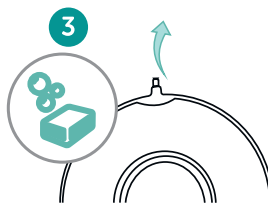

Po użyciu należy odkręcić zawór i wypuścić powietrze z kręgu. Czyścić ciepłą wodą z mydłem.

POZNAJ RÓWNIEŻ INNE PRODUKTY SANITY®



Nasza troskliwa strona internetowa: sanity.pl

Twój Opiekun Sanity
w Biurze Obsługi Klienta:



12 271 33 62 | Biuro czynne w dni robocze
od 8:00 do 16:00

od 1995
W trosce o Twoje zdrowie

since 1995
We care for your health



Albert Polska Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 4a
32-410 Dobczyce, Polska

Certyfikowany System ISO 13485

