



CICHO wSZA

Wyczeska

Grzebień do włosów

PRECISE & EASY TO USE

WYCZESZESZ PROBLEM Z GŁOWY



- STALOWA MOC – WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- Z SYSTEMEM PODWÓJNYCH KANAŁIÓW

Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy zachować ostrożność i przeczytać instrukcję użytkowania.



NAJLEPSZA OCHRONA

Grzebień ze stali nierdzewnej z systemem delikatnych podwójnych kanałków, który skuteczniej zbiera gnidy i wszy oraz jest delikatniejszy dla włosów.

Dzięki zaokrąglonemu spawanym końcówkom zapobiega uszkodzeniu skóry głowy i struktury włosów. Pozwala na dezynfekcję przez gotowanie bez utraty właściwości produktu.

SPOSÓB UŻYCIA

Umyj włosy np Szamponem CichoWsza, osusz je ręcznikiem i podziel na mniejsze pasemka. Ostrożnie przeprowadź Grzebień CichoWsza po włosach od cebulek aż po same końce. Wypłukaj grzebień po każdym przeczesaniu pasma włosów. Aby to zrobić, umieść grzebień w misce wypełnionej wodą i mydłem. Następnie osusz papierowym ręcznikiem, upewniając się, że usunąłeś wszy lub gnidy przymoco-

wane do grzebień. Po dokładnym wyczesaniu zalecamy ponowne umycie włosów. Możesz ponownie użyć Szamponu CichoWsza, aby wzmocnić efekt działania. Gdy włosy są suche, sprawdź je ponownie. Jeżeli wykryjesz jakiegokolwiek wszy lub gnidy, powtórz czynności.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCYJA

Zaleca się, po każdym użyciu, wygotować grzebień. W tym celu zanurz grzebień w pojemniku z wrzącą wodą przez co najmniej 5 do 10 minut, aby zabić wszy i ich gnidy. Zalecamy, by każdy członek rodziny miał własny grzebień..



Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik mieszka.

POZNAJ RÓWNIEŻ INNE PRODUKTY SANITY®



Nasza troskliwa strona internetowa: sanity.pl

Twój Opiekun Sanity
w Biurze Obsługi Klienta:



12 271 33 62

Biuro czynne w dni robocze
od 8:00 do 16:00

od 1995

W trosce o Twoje zdrowie

since 1995

We care for your health



Albert Polska Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 4a
32-410 Dobczyce, Polska

Certyfikowany System ISO 13485

