



# ЗРОШЕННЯ FEMINA

PROFESSIONAL & DELICATE

*ПРОСТИЙ СПОСІБ ПІДТРИМУВАТИ ГІГІЄНУ*



- структура, адаптована до анатомії жінки
- зручний у використанні
- Гігієнічний і безпечний без ВРА

## ІНСТРУКЦІЯ З ИКОРИСТАННЯ

Перед застосуванням слід уважно ознайомитися з інструкцією з використання.



Іригатор призначений для проведення вагінальних полоскань. Використовувати за призначенням. Завжди консультуються з лікарем щодо розчину, який використовується для зрошення. Не можна використовувати іригатор під час вагітності та менструації.

### ПЕРЕВАГИ ПРОДУКЦІЇ

- Фізіологічна форма і гнучкий наконечник.
- Допомога в підтримці природного складу вагінальної бактеріальної флори та інтимної гігієни
- Важливий елемент турботи про здоров'я жінки
- Доповнюючі лікування, рекомендоване лікарем

### ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед першими і кожним наступним використанням мийте всі частини окремо, всередині і зовні, а потім коротко кип'ятіть у великій кількості води.

Переконайтеся, що всі занурені частини можуть вільно плавати в киплячій воді.

Наповніть грушу рідиною для полоскання та закрутіть глечик. Вставте гнучкий наконечник (трубку) у піхву так, щоб його вигин відповідав анатомічній осі піхви.

Потім обережно натисніть на грушу, щоб рідина витікала через отвори на наконечнику та стекла по стінках піхви. Необхідно стежити за тим, щоб рідина не потрапила назад у піхву.

### ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ



#### УВАГА!

Не підходить для мікрохвильової печі.  
Не використовуйте дезінфікуючі засоби.  
Якщо одна з частин пошкоджена, викиньте набір.  
Зберігати в недоступному для дітей місці.



Інформація! Про будь-який серйозний інцидент, пов'язаний з виробом, необхідно повідомити виробника і відповідний орган держави-члена, в якій проживає користувач.

## ОЗНАЙОМТЕСЬ ТАКОЖ З ІНШОЮ ПРОДУКЦІЄЮ SANITY®



Наш турботливий веб-сайт: [sanity.pl](http://sanity.pl)

Ваш Опікун Sanity  
у Відділі обслуговування клієнтів:

 12 271 33 62 | Офіс працює в робочі  
дні з 8:00 до 16:00

od 1995  
W trosce o Twoje zdrowie

z 1995 року  
z dumką pro vaše zdraví



Albert Polska Sp. z o.o.  
ul. Obwodowa 4a  
32-410 Dobczyce, Polska

Сертифікована система ISO 13485

