

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.



ZESTAW AKCESORIÓW DO INHALATORÓW

PRZESTROGA

1. Nie używać urządzenia w przypadku stwierdzenia uszkodzonego opakowania. Produkt jest przeznaczony do użytkowania przez jedną osobę.
2. Nie przechowywać produktu w miejscu, w którym panuje wysoka temperatura, wysoka wilgotność lub silne nasłonecznienie.
3. Produkt nie zawiera lateksu ani ftalanów.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Podłączyć rurkę powietrza do otworu wylotowego na urządzeniu.
2. Drugą końcówkę rurki powietrza połączyć z dolną częścią zbiorniczka na lek.
3. Odkręcić pokrywę zbiorniczka na lek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, pociągnąć ją do góry i zdjąć.
4. Umieścić odpowiedni typ i ilość leku w zbiorniczku na lek, zgodnie z zaleceniami lekarza.
5. Umieścić głowicę rozpylającą pod pokrywą zbiorniczka na lek w taki sposób, aby zablokowały się zatrzaski.
6. Włożyć zbiorniczek na lek na swoje miejsce i zamknąć pokrywę obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
7. Podłączyć do zbiorniczka na lek wybrany typ maski lub ustnika. Uruchomić urządzenie. Upewnić się, że ze zbiorniczka wydostaje się aerozol.
8. W przypadku inhalacji z maską, założyć maskę zakrywając usta i nos. Oddychać normalnie.
9. W przypadku inhalacji z ustnikiem, umieścić ustnik pomiędzy wargami ust i zębami. Oddychać normalnie.
10. Ustawić pożądaną moc rozpylania za pomocą zaworu regulacyjnego nebulizacji umieszczonego na pokrywie zbiorniczka na lek.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Maska dla dorosłych, maska dla dzieci, rurka powietrza, zbiorniczek na lek, ustnik, kolanko.



Hünkar Ecza ve Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçeşme Mahallesi 2019 sk. No:5 Merkezefendi/ Denizli, Turcja
WYPRODUKOWANE W TURCJI

Importer: Albert Polska Sp. z o.o. ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, Polska